

degré K

www.degrek.com


LOLé 1 : installazione Kit UP-GRADE



Assicuratevi che l'illuminazione operatoria sia disconnessa dall'alimentazione principale.

1-

La testa della lampada può essere staccata dalle maniglie in quanto non sono necessarie. Togliere con cautela le maniglie tirandole verso l'esterno.

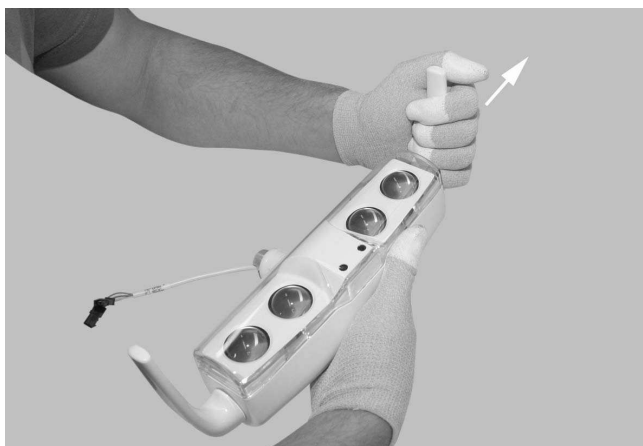

2-

Togliere il coperchio come illustrato. Svitare il tutto con una piccola chiave a brugola.




3-

Togliere la protezione e la maschera.

4-

Tagliare i 3 fili.

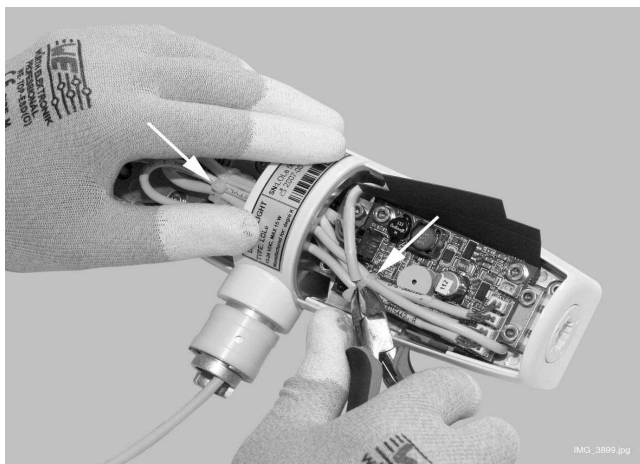


5-

Notare la posizione esatta del contatto prima di disconnettere i cavi degli opteled dal piano elettrico.

6-


Svitare il circuito dal supporto svitando le 3 viti con una chiave Allen 3 mm.

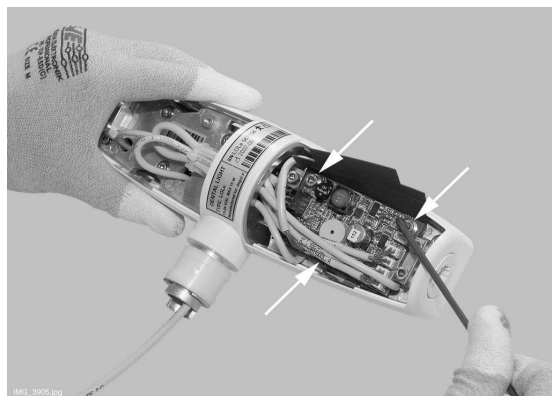

degréK

www.degrek.com


- 7- Svitare le due viti che collegano gli opteled con una chiave Allen 2,5 mm.

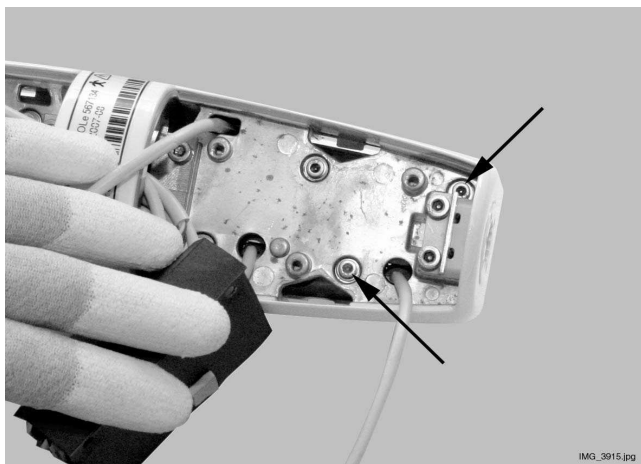

- 8-
- Disconnettere ed estrarre i led;
- Reinstallare i nuovi opteled.



uno dopo l'altro

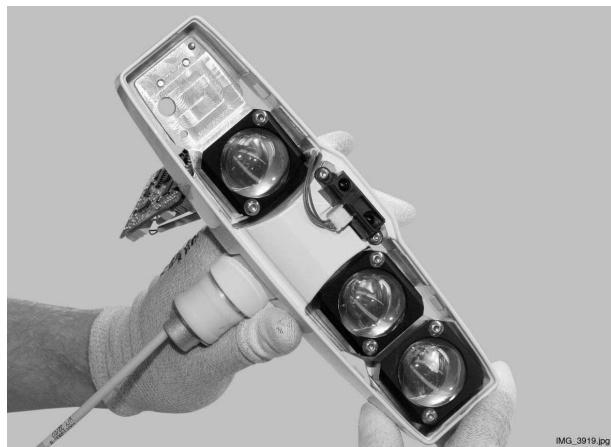


in base al numero crescente dei numeri!!



degré K

www.degrek.com

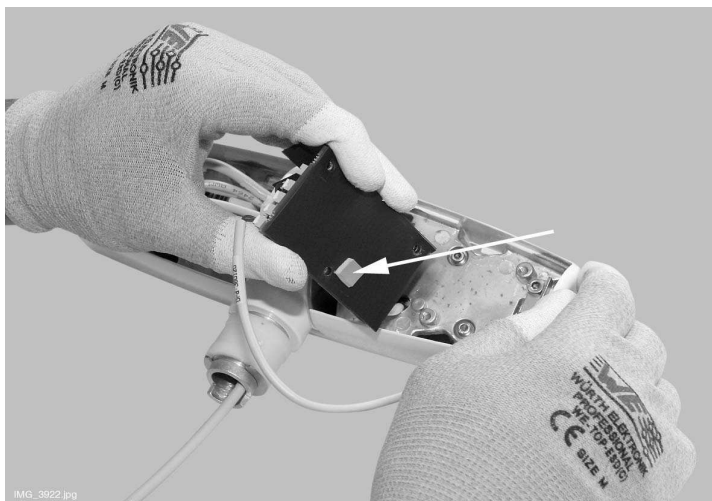

Attenzione :
avvitare bene le viti senza forzarle!

Assicurarsi che il conduttore di calore sia correttamente collegato al foglio isolante quando il piano elettrico ed il foglio isolante sono attaccati alla testata di illuminazione.

- 9-**
Ricollegare i coperchi superiori e le maniglie. Se la testa è stata rimossa dal braccio, riattaccare il braccio in base al manuale d'uso di lolé 1. Ricollegare la maschera protettiva.

Spot du LOLé 1 upgradé sur cible:

