

## LOLé 1 : installation du Kit UP-GRADE


V. avril 2013



**Assurez-vous que l'éclairage opératoire est bien déconnecté de l'alimentation principale**

1-

La tête de l'éclairage peut être détachée du bras.  
Cela n'est pas obligatoire.  
Retirer avec précaution les poignées en les tirant vers l'extérieur

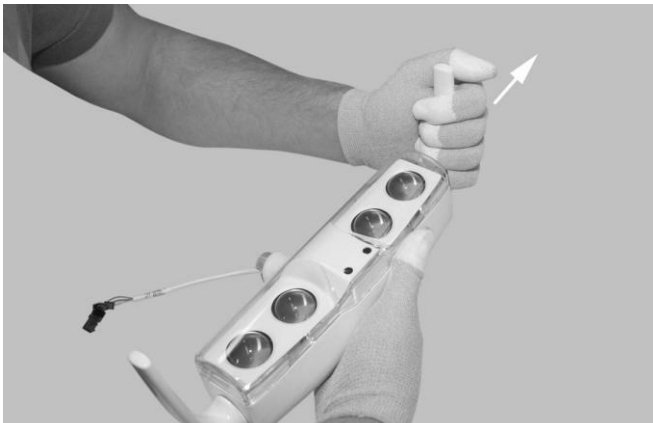

2-

Retirer les couvercles arrière comme illustré.  
Relâcher le blocage du couvercle par pression avec une petite clé Allen. Retirer le capot.




3-

Retirer la protection et le masque avant

4-

Couper les 3 colliers

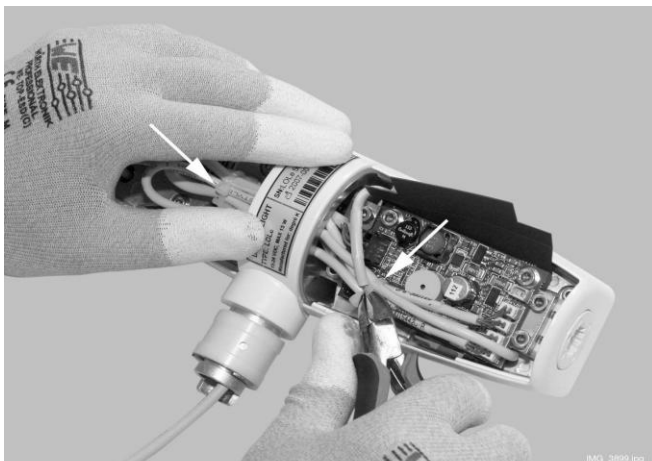


5-

Noter la position exacte du contact avant de déconnecter les câbles des opteleds de la platine électronique.

6-


Dévisser la platine électronique de son support en dévissant les 3 vis de fixation avec une clé Allen 3mm.

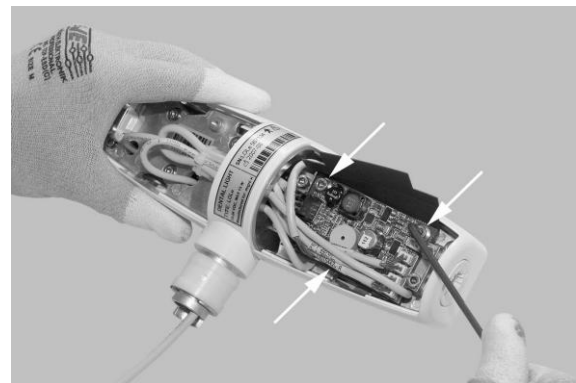

# degréK

www.degrek.com

- 7-  
Dévisser les 2 vis qui attachent chaque opteled avec  
une clé Allen 2.5mm

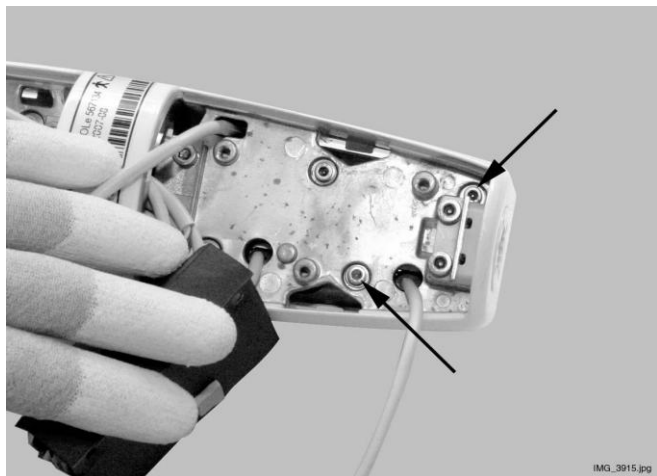

IMG\_3915.jpg

- 8-  
- Déconnecter et retirer l'opteled d'origine  
- Remonter le nouvel opteled



**l'un après l'autre**




IMG\_3919.jpg



**dans l'ordre croissant de leur numéros !!**



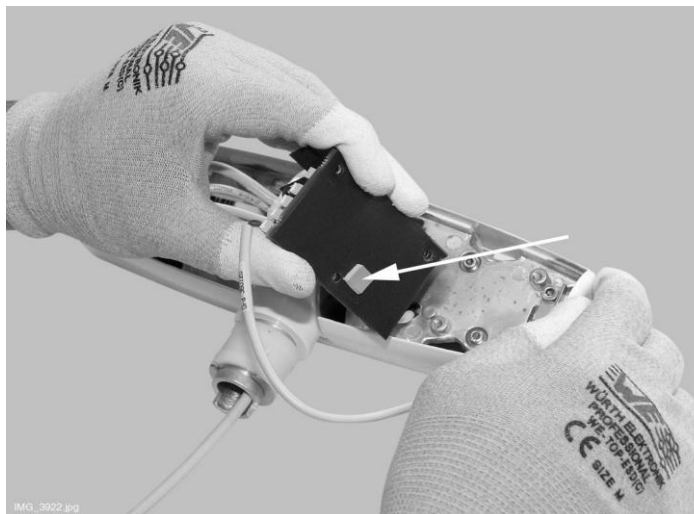

**Attention :**  
**bien serrer les vis sans les forcer !**

S'assurer que le plot conducteur de chaleur est correctement attaché à la feuille isolante lorsque la platine électronique et la feuille isolante sont rattachées à la tête d'éclairage.


**9-**

Remettre en place les couvercles arrière et les poignées.

Si la tête a été retirée du bras, la rattacher au bras selon les instructions de la notice de montage de LOLé 1

Remettre le masque et la visière


Spot du LOLé 1 upgradé sur cible:

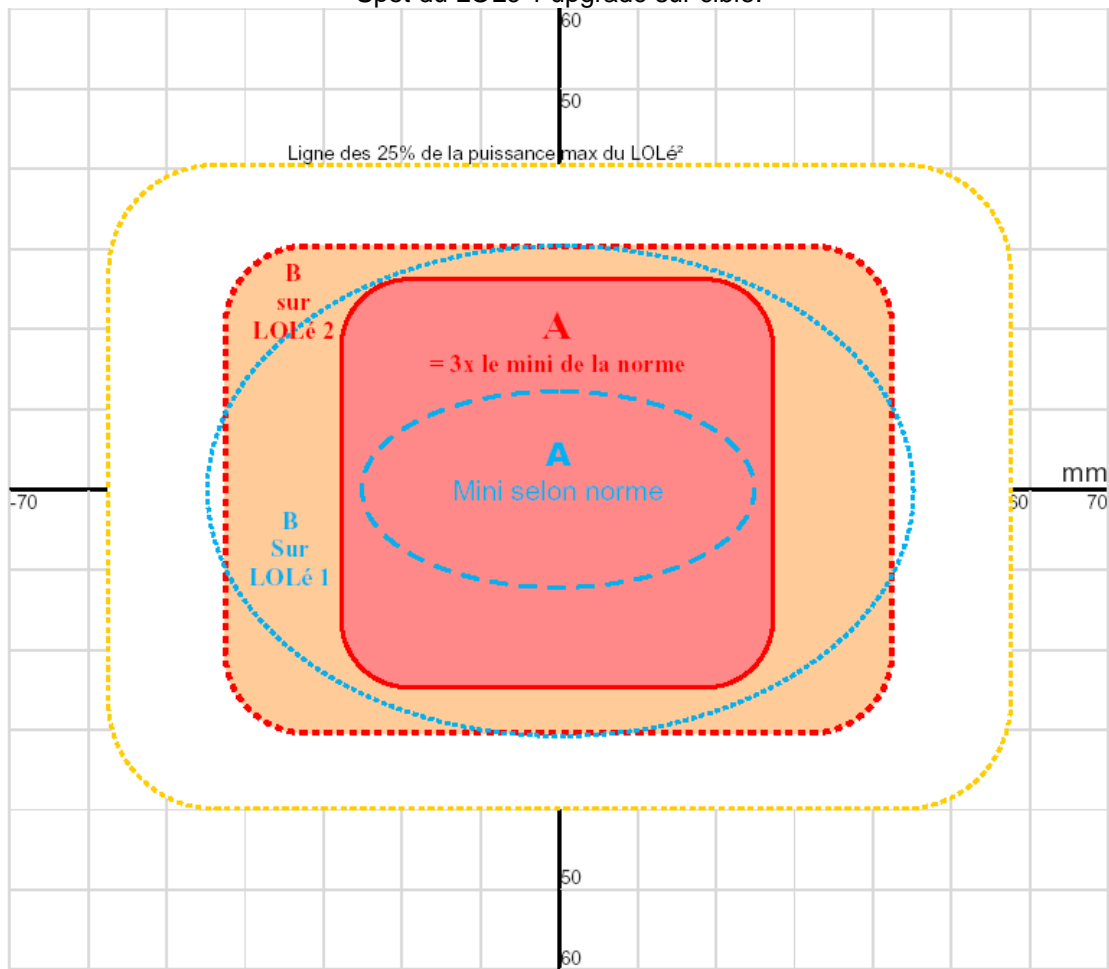


## ➔ Ajuster l'orientation des opteleds

- ⇒ Optimiser la forme et la répartition de la lumière du spot du LOLe par le réglage de la superposition des spots individuels : le spot du LOLe est obtenu par la superposition des 4 spots des opteleds.

1- Brancher l'alimentation de la tête de LOLe et allumer.  
Diriger la lumière vers une surface uniforme et plane à 70cm.  
Les champs d'éclairage des 4 opteleds doivent être au même niveau.  
Si ce n'est pas le cas, la position verticale de l'opteled peut être ajustée.

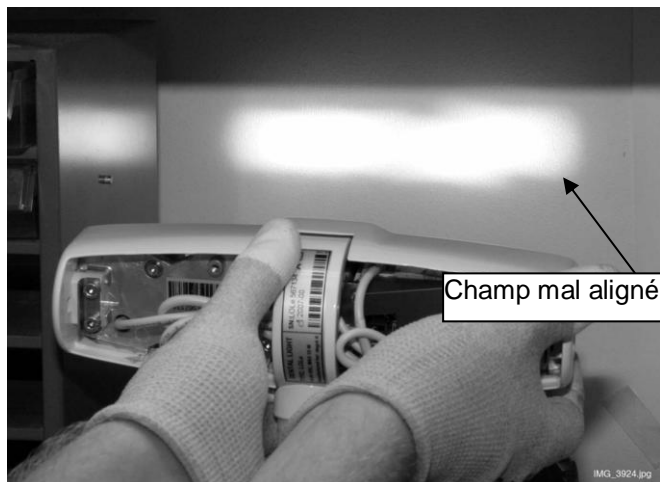

2- Dévisser légèrement les vis sur l'opteled avec une clé Allen 2.5mm et orienter l'opteled dans la bonne position.

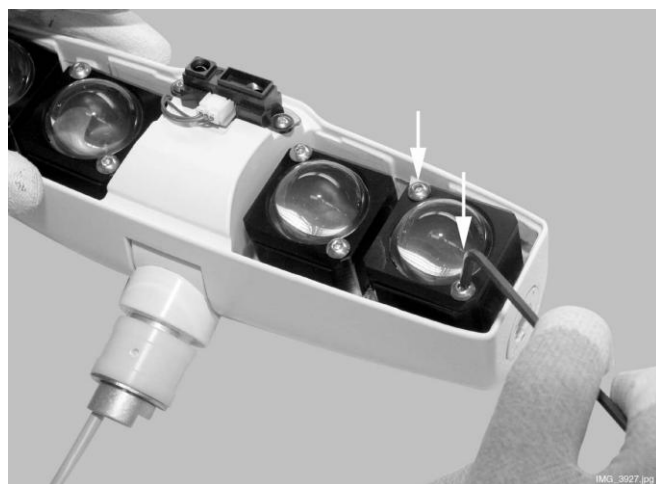

3- resserrer les vis et vérifier le spot d'éclairage.



4- Eteindre l'appareil et replacer le masque avant et la protection.