

degréK

www.degrek.com


LOLé 1: Einbauen des Upgrade Kits



Stellen Sie sicher, dass die OP-Lampe nicht an die Hauptstromversorgung angeschlossen ist!

1-


Der Lampenkopf kann vom Arm abgenommen werden. Dies ist aber keine Pflicht. Nehmen Sie die Griffe vorsichtig ab, indem Sie waagrecht nach Außen ziehen.

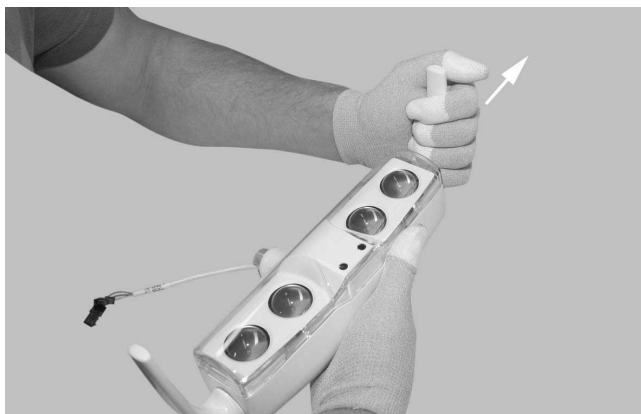

2-

Entfernen Sie die hinteren Abdeckungen, wie in der Abbildung.

Lockern Sie die Abdeck-Sperre mit einem kleinen Inbusschlüssel durch Druck, auf. Nehmen Sie die Abdeckungen ab.

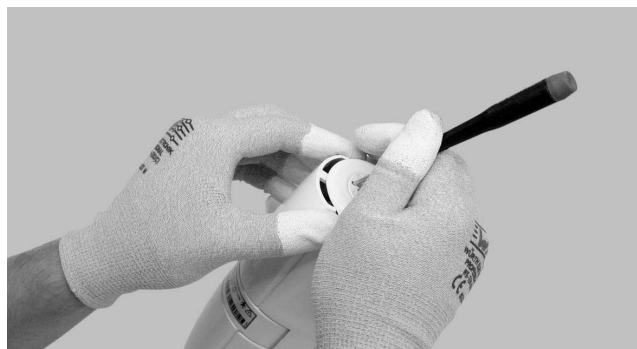


3-

Nehmen Sie die Abdeckkappe und die Vordermaske ab.

4-

Schneiden Sie die 3 Ringe auf.

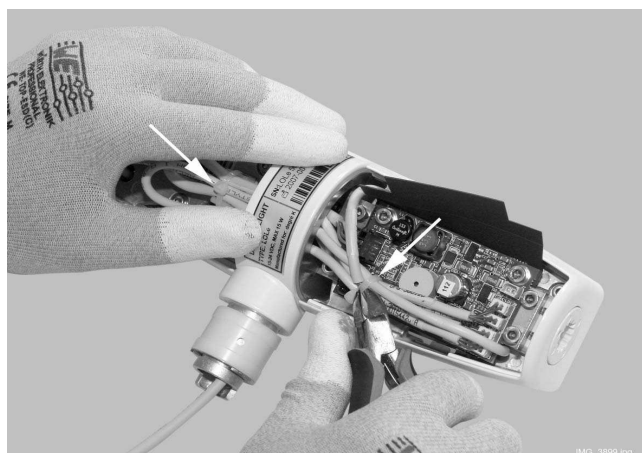


5-

Merken Sie sich die genaue Kontakt-Position bevor Sie die Opteled- Kabeln von der elektronischen Platine abtrennen.

6-

Schrauben Sie die Platine von dem Sockel auf, indem Sie die 3 Schrauben mit einem 3mm Inbusschlüssel aufdrehen.

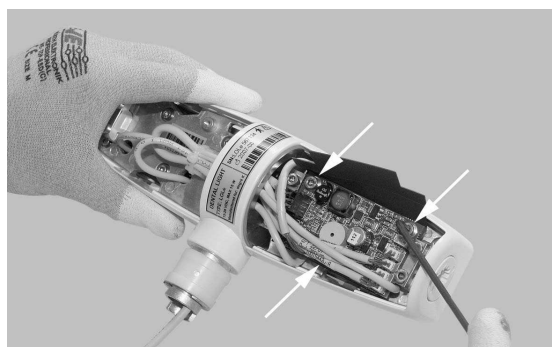


degréK

www.degrek.com

7-

Die 2 Schrauben, die jedes Opteled festhalten, mit einem 2,5mm Inbusschlüssel, aufschrauben.

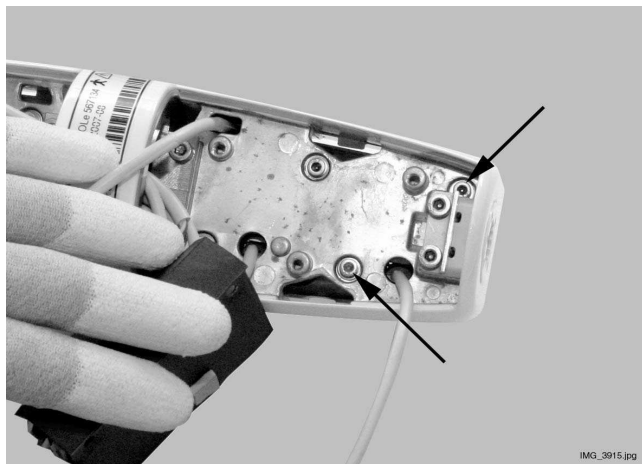


8-

- Entfernen Sie das ursprüngliche Opteled und
- setzen Sie das neue Opteled ein.



Eins nach dem Anderen.

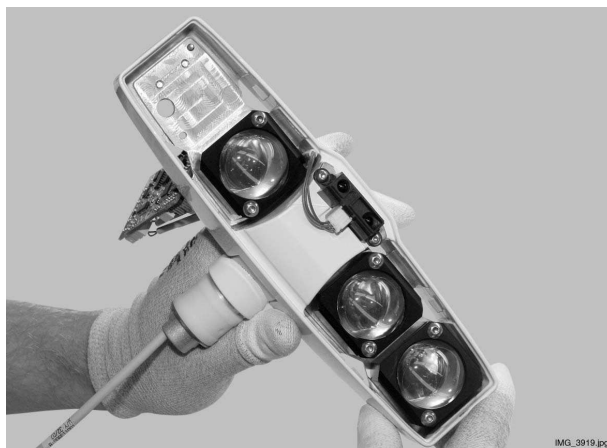


**In steigender Reihenfolge, den
Seriennummern nach!!**



degréK

www.degrek.com

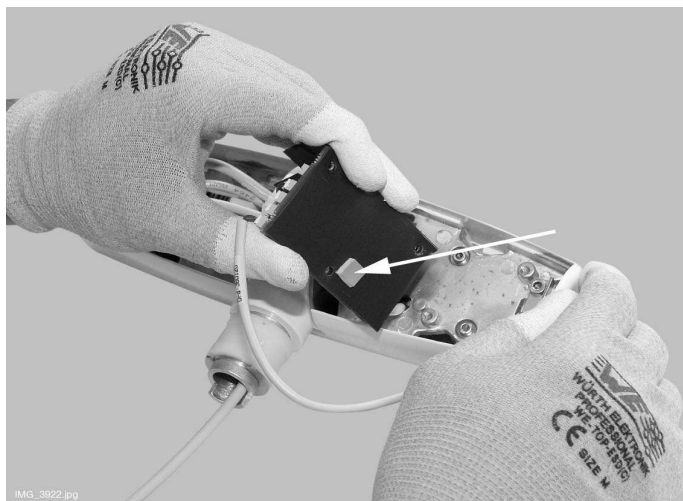

Achtung:
Die Schrauben gut festschrauben ohne sie aber dabei zu forcieren!

Stellen Sie sicher, dass das Wärme-Kontaktplättchen, beim Anschließen der Platine an das Isolierblatt an den Lampenkopf, richtig am Isolierblatt ist.

9-
Bringen Sie die hinteren Abdeckungen und die Lampengriffe an.
Falls der Lampenkopf von dem Arm getrennt wurde, montieren Sie ihn wieder an den Arm, indem Sie der LOLé 1 Anleitung folgen.
Bringen Sie die Maske und die Griffe an.

Lichfleck auf Zielscheibe der up-gegradeten LOLé 1:

