

degré K

www.degrek.com


LOLé 1 : installation du Kit UP-GRADE



Assurez-vous que l'éclairage opératoire est bien déconnecté de l'alimentation principale

1-

La tête de l'éclairage peut être détachée du bras.
Cela n'est pas obligatoire.
Retirer avec précaution les poignées en les tirant vers l'extérieur

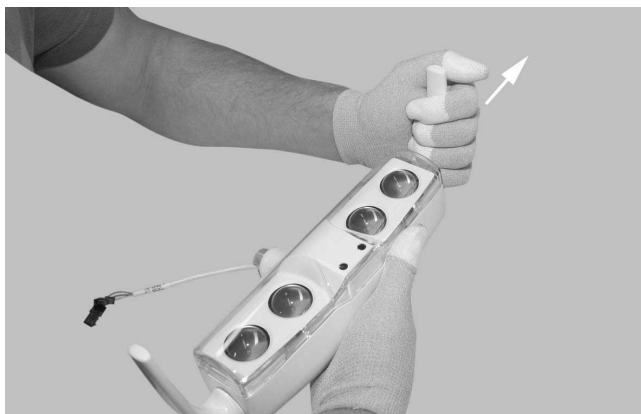

2-

Retirer les couvercles arrière comme illustré.
Relâcher le blocage du couvercle par pression avec une petite clé Allen. Retirer le capot.




3-

Retirer la protection et le masque avant

4-

Couper les 3 colliers

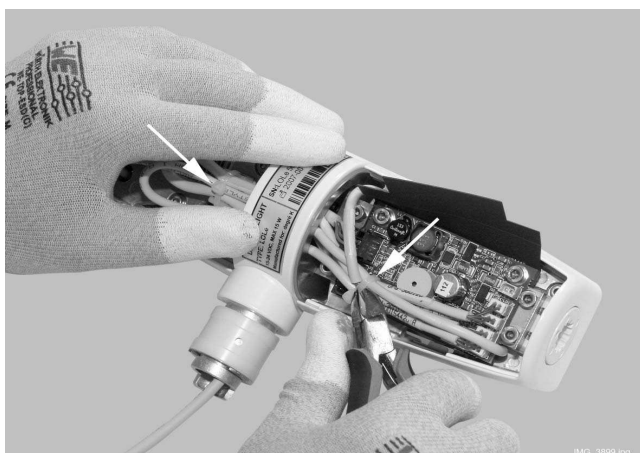


5-

Noter la position exacte du contact avant de déconnecter les câbles des optoleds de la platine électronique.

6-


Dévisser la platine électronique de son support en dévissant les 3 vis de fixation avec une clé Allen 3mm.

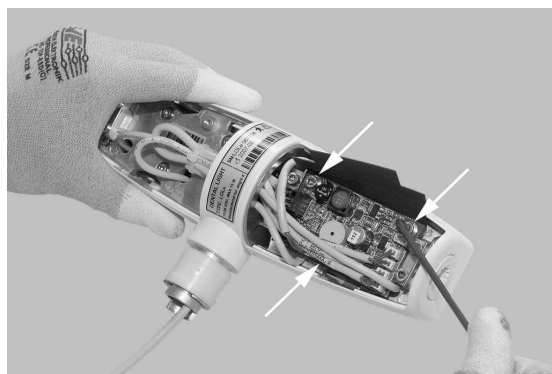

degréK

www.degrek.com

- 7- Dévisser les 2 vis qui attachent chaque opteled avec une clé Allen 2.5mm

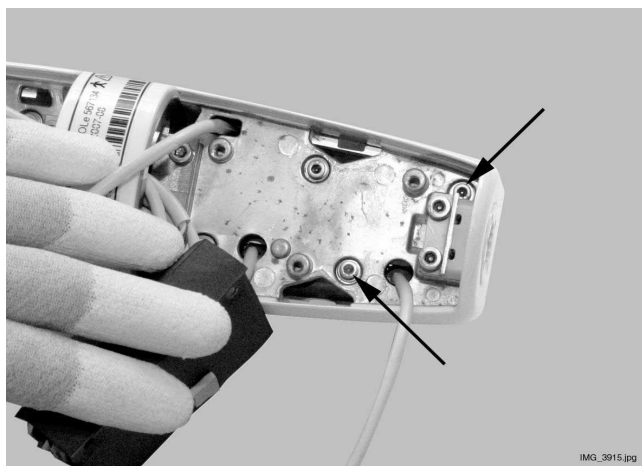


IMG_3915.jpg

- 8-
- Déconnecter et retirer l'opteled d'origine
- Remonter le nouvel opteled



l'un après l'autre

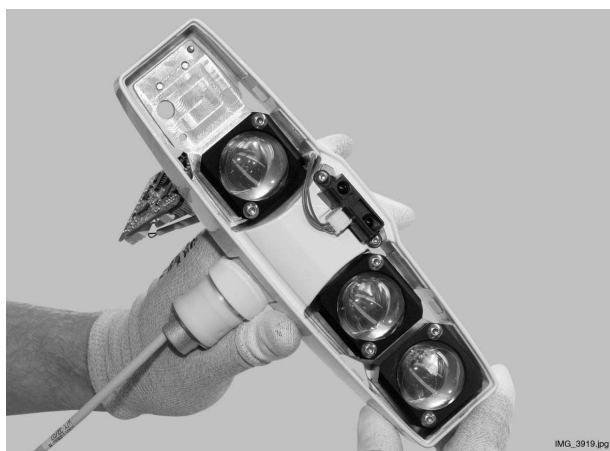

IMG_3919.jpg




dans l'ordre croissant de leur numéros !!



degré K

www.degrek.com

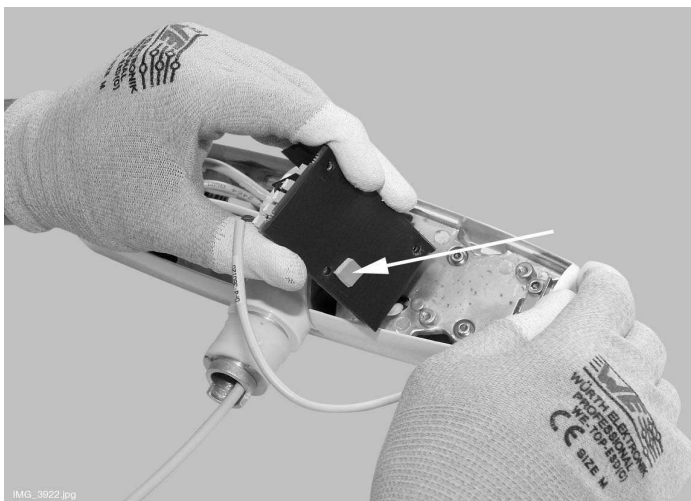

Attention :
bien serrer les vis sans les forcer !

S'assurer que le plot conducteur de chaleur est correctement attaché à la feuille isolante lorsque la platine électronique et la feuille isolante sont rattachées à la tête d'éclairage.

9-

Remettre en place les couvercles arrière et les poignées.

Si la tête a été retirée du bras, la rattacher au bras selon les instructions de la notice de montage de LOLé 1

Remettre le masque et la visière

Spot du LOLé 1 upgradé sur cible:

