

Anpassung einer LOLé 2. E auf eine KaVo Ausrüstung

A. Ersatz einer OP Lampe KaVo auf eine bestehende Ausrüstung

- KaVo Sun 1415 : den Adapterring K15 auf die ursprüngliche Stange verwenden
- KaVo Lux 1410: das Benutzen des Adapterrings K10 erfordert das UMDREHEN der Stange (siehe Abbildung): auf dem Bild sind Kratzerabdrücke, die von der vorherigen Montage stammen, zu erkennen.

Es gibt 2 Möglichkeiten:

- i. eine neue 1415 Stange zusammen mit dem Adapterring K15 verwenden
- ii. eine neue 1410 Stange – siehe weiter unten- und den Adapterring K10 verwenden

B. Montage einer LOLé 2.E anstelle einer KaVo OP Lampe auf eine neue Ausrüstung

- KaVo Sun 1415 : den Adapterring K15 auf die ursprüngliche Stange benutzen
- KaVo Lux 1410 : eine umgedrehte 1410 Stange – siehe Abbildung- und den Ring K10 verwenden



1) die Stange 1410 umdrehen, so dass die Stelle der Erdung sich oben befindet.



2) die Dichtung KAVO 1058 (umgekehrt) auf der Stange benutzen, um die Bohrung zu verstecken und die Adapter K10 zu inserieren