

Adaptation d'un LOLé 2.E sur équipement Kavo

A. Remplacement d'une lampe opératoire Kavo sur équipement existant

- Kavo Sun 1415 : utilisez la bague K15 sur la colonne d'origine
- Kavo Lux 1410 : l'utilisation de la bague K10 nécessite le retournement de la colonne (voir ci-dessous) : celle en place porte des marques du montage précédent.

Il y a 2 solutions :

- i. utiliser une colonne de 1415 neuve et la bague K15
- ii. utiliser une colonne de 1410 neuve - voir ci-dessous - et la bague K10

B. Montage sur équipement neuf d'un LOLé 2.E au lieu d'une lampe opératoire Kavo

- Kavo Sun 1415 : utilisez la bague K15 sur la colonne d'origine
- Kavo Lux 1410 : utiliser une colonne de 1410 inversée - voir ci-dessous - et la bague K10



1) Retourner la colonne 1410 de façon à ce que l'emplacement de la prise de terre soit en haut.



2) Utiliser le joint KAVO 1058 (inversé) sur la colonne pour cacher le percement et insérer l'adaptateur K10