

Betriebsanleitung LOLé 2

Vor Geräte-Inbetriebnahme lesen Sie bitte die Anweisung vollständig.

- Benutzen Sie nicht die OP -Lampe ohne den Vorderschutzschirm..
- Beachten Sie, dass Ihr Patient beim Hinsetzen oder Aufstehen, weder den Lampenarm noch die Lampen-Griffe als Stütze benutzt.
- Wassertropfen auf der OP-Lampe und deren Elektroversorgung sind selbstverständlich zu vermeiden.
- Das elektrische Versorgungsgehäuse bitte nicht öffnen und nicht auf den Boden stellen.
- LOLé nicht in der Nähe von entzündlichen Produkten benutzen.
- LOLé entspricht der Norm IEC 601-1-2. In gewissen Fällen kann es allerdings zu elektromagnetischen Störungen mit anderen empfindlichen Werkzeugen kommen.

ALLGEMEINE INSTANDHALTUNG:

Die OP-Lampe nur im kalten Zustand bedienen und vor jeglicher Reinigung bitte vom Stromnetz abschalten.

Die Lampe ist dicht gegen Staub und Sprühnebel. Entstauben Sie die OP-Lampe regelmäßig oben und unten, die Reinigung der Oberflächen ist mit einem feuchten Tuch und einem geeigneten Desinfektionsmittel (kein Schleifmittel) durchzuführen (mit einem nicht aggressiven Desinfektionsmittel z. B. Dürr FD322 oder FD333).

Die Lampe nachher mit einem weichen Tuch, ohne zu reiben, abwischen.

Die zwei LOLé- Griffe können Sie, indem sie sie nach Außen ziehen, abnehmen. Sie können bis zu 135°C sterilisiert werden.

Lassen Sie nach der Sterilisierung die Griffe komplett abkühlen. Griffe die noch warm und ausgedehnt sind werden bei der Einführung in den Lampenkopf mit Kraft eingedrückt. Dies führt zur Beschädigung des Griffaufnahmesystems.

BEDIENUNG:

LOLé muss immer 70 cm vom Patientenmund entfernt sein:

- direktes Sehvermögen: Zahnarzt zwischen 8 Uhr und 10 Uhr => LOLé senkrecht auf den Mund ausgerichtet
- indirektes Sehvermögen: Zahnarzt zwischen 11 Uhr und 13 Uhr => LOLé über die Schulter des Praktikers

A/ Die LOLé OP- Lampe wird mithilfe einer Zelle ein- und ausgeschaltet.

Damit wird auch die Lichtstärke eingestellt (gedimmt). Die Zelle, die sich unter dem Lampenkopf befindet, reagiert auf Ihre Hand bis zu einem Abstand von 3-4 cm.

Für das Ein-Schalten: gehen Sie mit der Hand im unteren Bereich der Zelle vorbei.

Lichtstärke regeln: wenn die Lampe an ist, halten Sie die Handfläche vor der Zelle, ohne aber sie zu berühren: die grünen LED, an der sichtbaren Lampenfläche, zeigen die Leistungsveränderungen an.

PS: Die Lampe verbraucht sehr wenig Energie und strahlt deswegen keine Wärme aus: es ist nicht nötig diese nach jedem Patient auszuschalten.

Bei erneutem Einschalten ist die Lichtstärke die Gleiche wie vor dem Ausschalten.




Detektions-bereich der Zelle

B/ Die LOLé soll ausschließlich mithilfe der Seitengriffe gehandelt werden.

Vermeiden Sie das Ziehen am Kopf oder am Lampenarm.

C/ Der große Armfederweg erlaubt die « reverse » Beleuchtung der mandibulären Schneidezähne im Unterkiefer.

Der Lampenarm dreht sich bis zu 332°. Der tote Winkel der Armdrehung befindet sich über das Becken.

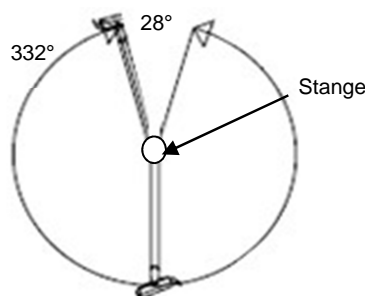

Denken Sie an die Umwelt; bringen Sie an seinem Lebensende die wieder verwertbaren Teile in dafür geeignete Wiederverwertungszentren; dies nachdem Sie die nicht verwertbaren Teile beseitigt haben.