

LOLé 2 : Notice d'utilisation

Lire intégralement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.

- Ne pas utiliser votre éclairage opératoire LOLé sans l'écran de protection avant.
- Veiller à ce que votre patient ne prenne pas appui sur le bras ou les poignées du LOLé 2 pour se lever ou s'asseoir.
- Ne pas asperger d'eau l'éclairage opératoire LOLé ou l'alimentation électrique.
- Ne pas ouvrir le boîtier d'alimentation et ne pas l'installer au sol.
- LOLé n'est pas prévu pour être utilisé dans l'entourage de produits inflammables.
- LOLé répond aux exigences de la norme IEC 601-1-2. Cependant, d'autres instruments peuvent provoquer des interférences électromagnétiques.

ENTRETIEN GENERAL :

Attendre le refroidissement du LOLé 2 et mettre hors tension avant tout nettoyage.

LOLé 2 est étanche à la poussière et aux projections. Dépoussiérer la lampe opératoire dessus dessous régulièrement, nettoyer les surfaces exposées avec un chiffon humide et un produit non abrasif prévu à cet effet (agent désinfectant non agressif Dürr FD366).

Puis **essuyer sans frotter avec un chiffon doux**.

Les deux poignées du LOLé peuvent être enlevées en les tirant vers l'extérieur, puis être stérilisées jusqu'à 135°C max.

Il convient d'attendre le complet refroidissement des poignées après stérilisation. Des poignées encore chaudes et dilatées nécessitent d'être entrées en force et endommagerons le système de maintien.

UTILISATION :

LOLé s'utilise toujours à 70cm de la bouche :

- vision directe : praticien entre 9h et 11h => LOLé à la verticale de la bouche
 - vision indirecte : praticien entre 11h et 13h => LOLé au-dessus de l'épaule du praticien
- Mesure effectuées selon ISO 9680 : taille de la tâche éclairante 160 x 80 mm

A/ Un capteur permet d'éteindre et d'allumer l'éclairage opératoire LOLé, et de régler l'intensité de l'éclairement.

Le capteur détecte votre main jusqu'à une distance de 3-4cm, sous la tête.

Pour mettre en marche : passez votre main sous la tête.

Pour éteindre : passez votre main sous la tête.

Pour régler l'intensité : une fois le LOLé allumé, laissez votre main sous la tête : les LED vertes de façade indiquent la progression de la variation.

NB : LOLé a une très faible consommation électrique et n'émet donc pas de chaleur : il n'est pas nécessaire de l'éteindre entre chaque patient.

LOLé se rallumera au niveau auquel il aura été éteint précédemment.




Zone de détection
du capteur

B/ LOLé doit être manipulé uniquement par les poignées latérales.

Ne pas le déplacer en tirant sur le bras ou la tête d'éclairage.

C/ Le grand débattement du bras permet un éclairage « reverse » de la face linguale des incisives mandibulaires.

Le bras a une possibilité de rotation de 332°. L'angle mort de la rotation du bras se situe au-dessus du crachoir.

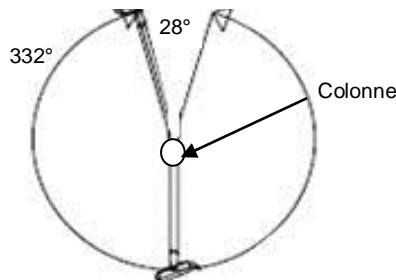

Afin de contribuer au respect de l'environnement, les parties recyclables du LOLé 2 en fin de vie doivent être acheminées vers les centres de traitement des déchets appropriés après en avoir retiré les parties non recyclables.