

Utilisation

La lampe opératoire dentaire LOLé 2 doit être utilisée uniquement par le personnel médical autorisé à effectuer les interventions dentaires.

Degré K décline toute responsabilité pour l'utilisation incorrecte ou impropre de la lampe.

- Ne pas utiliser votre éclairage opératoire LOLé 2 sans la visière.
- Veiller à ce que votre patient ne prenne pas appui sur le bras ou les poignées du LOLé 2 pour se lever ou s'asseoir.
- Ne pas asperger d'eau l'éclairage opératoire LOLé ou l'alimentation électrique.
- Ne pas ouvrir le boîtier d'alimentation et ne pas l'installer au sol.
- LOLé n'est pas prévu pour être utilisé dans l'entourage de produits inflammables.
- LOLé répond aux exigences de la norme IEC 601-1-2. Cependant, d'autres instruments peuvent provoquer des interférences électromagnétiques.

LOLé s'utilise toujours à 70cm de la bouche :

- vision directe : praticien entre 8h et 10h => LOLé à la verticale de la bouche
- vision indirecte : praticien entre 11h et 13h => LOLé au-dessus de l'épaule du praticien

A/ Un capteur permet d'éteindre et d'allumer LOLé, et de régler l'intensité de l'éclairage.

=> Le capteur détecte votre main jusqu'à une distance de 3-4cm, sous la tête.

Pour mettre en marche : passez votre main sous la tête.

Pour éteindre : passez votre main sous la tête.

Pour régler l'intensité : une fois le LOLé allumé, laissez votre main sous la tête : les LED vertes de façade indiquent la progression de la variation.

NB : LOLé a une très faible consommation électrique et n'émet donc pas de chaleur : il n'est pas nécessaire de l'éteindre entre chaque patient.

LOLé se rallumera au niveau auquel il aura été éteint précédemment.




Zone de détection du capteur

B/ LOLé doit être manipulé uniquement par les poignées latérales.

Ne pas le déplacer en tirant sur le bras ou la tête d'éclairage.

C/ Le grand débattement du bras permet un éclairage « reverse » de la face linguale des incisives mandibulaires.

Le bras a une possibilité de rotation de 332°. L'ang le mort de la rotation du bras se situe au-dessus du crachoir.

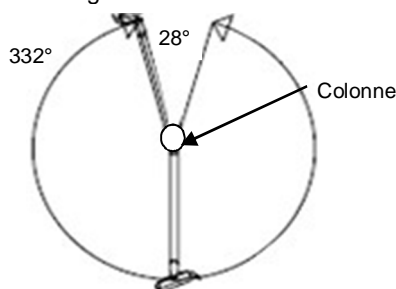

Entretien

Attendre le refroidissement du LOLé 2 et mettre hors tension avant tout nettoyage.

LOLé 2 est étanche à la poussière et aux projections. Dépoussiérer la lampe opératoire dessus dessous régulièrement, nettoyer les surfaces exposées avec un chiffon humide et un produit non abrasif prévu à cet effet (agent désinfectant non agressif sans Alcool).

Puis essuyer sans frotter avec un chiffon doux.

Les deux poignées du LOLé peuvent être enlevées en les tirant vers l'extérieur (pouce en appui sur la tête d'éclairage), puis être stérilisées jusqu'à 135°C max.

Il convient d'attendre le complet refroidissement des poignées après stérilisation. Des poignées encore chaudes et dilatées nécessitent d'être entrées en force et endommagerons le système de maintien.

Garantie

Le fabricant certifie la construction correcte du produit, dans le respect des règles nationales et communautaires de référence. Le produit est couvert par une période de garantie de 12 mois à partir de la date de facturation. La garantie est limitée au changement ou à la réparation des parties ou des pièces défectueuses (si le défaut est lié à la fabrication).

Les opérations de montage, de réglage, les modifications et réparations doivent être effectuées par du personnel autorisé et en employant des pièces de rechange originales fournies par degré K.

Les installations électriques des locaux où la lampe est installée doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur.

L'appareil doit être utilisé conformément au mode d'utilisation fourni.

Sont exclues de la garantie :

- Les frais de main d'œuvre, les frais de déplacement des techniciens, les frais de transport.
- Dommages et pannes causés par toute personne par non-respect du présent manuel.
- Dommages causés par des installateurs, réparateurs.
- Toute sorte de détérioration causée par un personnel non-autorisé à effectuer l'intervention.
- Les pièces sujettes à l'usure (des consommables).

Degré K n'est en aucun cas responsable des réparations effectuées par des tiers ou par du personnel non-autorisé. Veuillez nous contacter directement pour avoir les coordonnées des distributeurs et des techniciens autorisés.

Avertissements DEEE



Ce produit est conforme à la directive EU 2002/96/EC.

Le symbole représentant une poubelle barrée présent sur l'appareil indique qu'à la fin de son cycle de vie, il devra être traité séparément des déchets domestiques. Il devra donc être confié à un centre de collecte sélective pour appareils électriques et électroniques ou rapporté au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil.

L'utilisateur est responsable de la remise de l'appareil usagé aux structures de collecte compétentes sous peine des sanctions prévues par la législation sur l'élimination des déchets.

La collecte sélective réalisée avant le recyclage, le traitement et l'élimination compatible avec l'environnement de l'appareil usagé contribue à éviter les nuisances pour l'environnement et pour la santé et favorise le recyclage des matériaux qui composent le produit