

Manuale d'uso LOLé 2

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

- Non utilizzare la vostra lampada operatoria LOLé senza la protezione sopra.
- Controllate che il vostro paziente non afferrì il braccio o le maniglie di LOLé 2 per alzarsi.
- Non spruzzare acqua sulla lampada operatoria o sui cavi di alimentazione.
- Non aprire la scatola di alimentazione e non installare al sole e non esporla al sole.
- Non utilizzare LOLé vicino a prodotti infiammabili.
- LOLé rispetta le norme IEC 601-1-2. Di conseguenza altri strumentazioni possono provocare delle interferenze elettromagnetiche.

MANUTENZIONE GENERALE :

Attendere il raffreddamento di LOLé e spegnerla prima della pulizia.

LOLé 2 è protetta contro polvere e spruzzi. Pulire l'interno della lampada operatoria regolarmente, pulire le superfici esposte con un panno umido ed un prodotto non abrasivo destinato a questo scopo. (agente disinfettante non aggressivo Dürr FD366).

Quindi pulire delicatamente con un panno morbido.

Le due impugnature della Lolé possono essere tolte tirandole verso l'esterno, e poi essere sterilizzate fino a 135°C. E' preferibile attendere il completo raffreddamento delle maniglie al termine della sterilizzazione. Le maniglie ancora calde e allentate hanno bisogno di dilatarsi altrimenti danneggiano il sistema di supporto.

UTILIZZO:

LOLé deve sempre essere utilizzata a 70 cm dalla bocca:

- visione diretta: dottore posizionato a 9h e 11h => LOLé è in posizione verticale dalla bocca
- visione indiretta: il dottore in posizione 11h e 13h => LOLé è sopra la spalla del medico

A/ Un sensore permette di spegnere ed accendere Lolé e regolare l'intensità di illuminazione.

Il sensore rileva il movimento fino ad una distanza di 3-4 cm dalla testata.

Per accendere e per spegnere : passate la mano sotto la testa.

Per regolare l'intensità : una volta che LOLé si illumina, lasciate la mano sotto la testa. I LED verdi davanti alla testa indicano la variazione dell'intensità.

NB : LOLé ha un consumo energetico estremamente ridotto e quindi non emette calore : non c'è bisogno di spegnerlo tra un paziente e l'altro.

LOLé si riaccenderà al livello in cui era stata impostata precedentemente.




Zona di funzione del sensore

B/ LOLé deve essere manipolata unicamente attraverso le maniglie laterali

Non muovere la lampada tirando il braccio o la testa.

C/ La grande ampiezza del braccio permette un'illuminazione rovesciata sulla superficie linguale e gli incisivi inferiori. Il braccio può essere rotato di 332°. L'angolo cieco della rotazione del braccio si posiziona sopra.

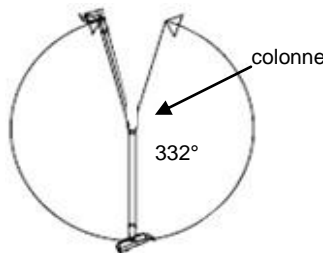

Al fine di contribuire al rispetto dell'ambiente, le parti riciclabili di LOLé 2 devono essere smaltite nei centri di trattamento dei rifiuti dopo avere tolto le parti riciclabili.